




V-1000



## SI UPORABNIŠKA NAVODILA

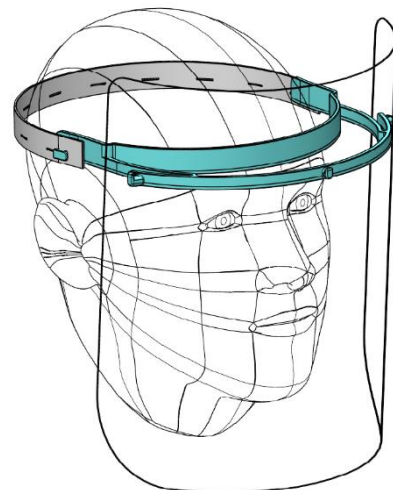


<b>Naziv izdelka</b>	SloShield V-1000
<b>Tip izdelka</b>	Obrazni zaščitni vizir
<b>Šifra izdelka</b>	PV-001065
<b>Namen uporabe zaščitne opreme</b>	Zaščitni vizir za zaščito obraza pred brizganjem in pršenjem tekočin. S tem zmanjšuje tveganje za kapljični prenos in okužbe. Vizir ne nudi popolne zaščite proti virusom, bakterijam ali drugim biološkim dejavnikom. Priporoča se kombinirana uporaba s primerno zaščitno obrazno masko.
<b>Specifikacije izdelka</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Izdelek se sestoji iz 3 sestavnih delov, ki so dobavljeni nesestavljeno, te deli so: nosilec za večkratno uporabo, elastičen trak in prozorna folija vizirja za enkratno uporabo.</li><li>Zamenljiva folija vizirja. En nosilec je namenjen za uporabo z do 20 novih folij (dobavljeno ločeno).</li><li>Popolna prilagodljivost – univerzalna velikost</li></ul>

Nastavljiv elastičen trak

Nosilec

Prozorna folija vizirja

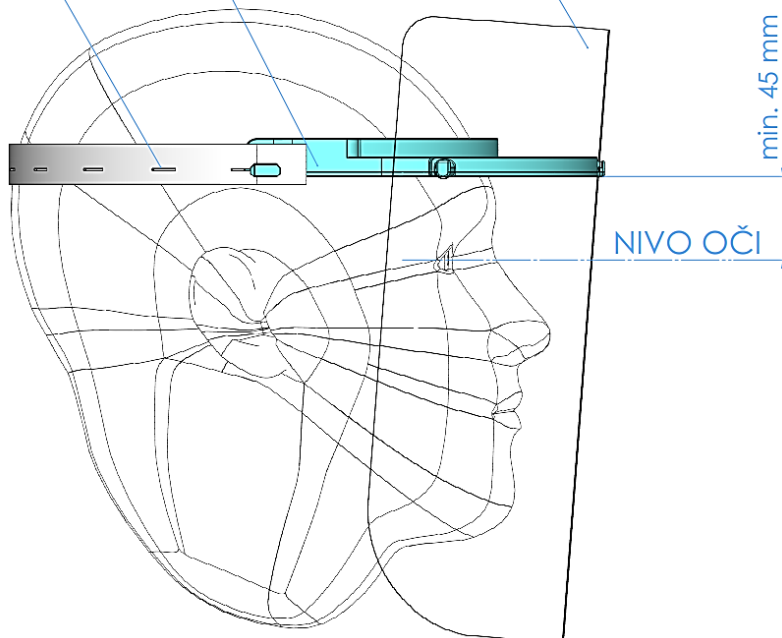

**OPOZORILO:** Namen zaščitnega vizirja je izključno zaščita obraza pred kapljičnim prenosom. Izdelek ne nudi zaščite obraza pred mehanskimi poškodbami ali letečimi delci in ga v ta namen ni dovoljeno uporabljati.

Plastika Virant d.o.o.  
Pod Hrasti 20  
SI-1218 Komenda  
Slovenia, EU

CONTACT US:  
info@plastika-virant.si  
+386 1 780 40 80



Plastika Virant

www.plastika-virant.si




## Navodila za sestavo in uporabo

1. Odstranite zaščitno folijo iz obeh strani vizirja (1)



ODSTRANI NA OBEH STRANEH

2. Pri sestavi folije vizirja z nosilcem bodite pozorni na pravilno orientacijo nosilca – kot je prikazano na risbi izdelka. Stransko luknjo zaslonke pripnite na stranski zatič nosilca (2), nadaljujte postopek s pripenjanjem zaslonke na sredinski zatič nosilca (3) in nazadnje pripnite na drugem stranskem zatiču. Zadnje pripenjanje si lahko olajšate z rahlim iztegovanjem nosilca kot kaže slika (4).
3. Pripnite elastični trak na za to namenjene zatiče na obeh straneh nosilca. Elastični trak ima za zapenjanje na voljo večje število zarez, pripnite trak na poljubno zarezo in si na ta način prilagodite dimenzijo traku na želeno velikost. Namestitev na glavo uporabnika naj bo udobna vendar hkrati dovolj čvrsta za namen uporabo. Pozicija namestitve naj bo v skladu z risbo izdelka.

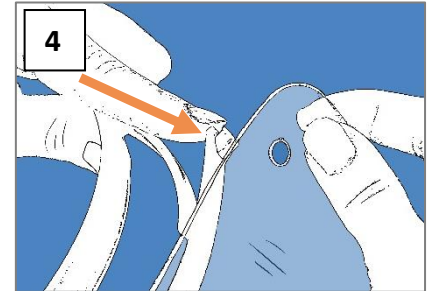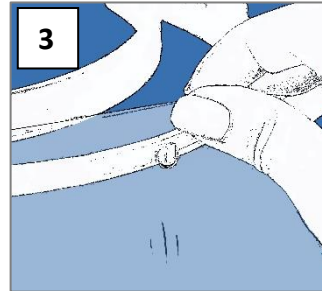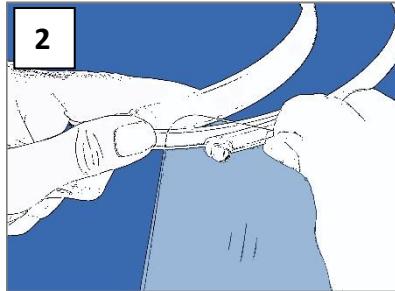

**OPOZORILO:** Materiali, ki lahko pridejo v stik s kožo uporabnika lahko povzročijo alergične reakcije pri občutljivih posameznikih.

## Postopek čiščenja in razkuževanja

### Pred prvo uporabo:

- Dobavljeni izdelek ni sterilan. Za varno in optimalno uporabo vedno očistite in dezinficirajte vaš izdelek pred prvo uporabo.
- Redno preverjate brezhibnost vašega izdelka. Pred vsako uporabo preverite, da izdelek ni poškodovan in da ni sledi obrabe. Pri uporabi se vedno držite navodil proizvajalca.

### Čiščenje in dezinfekcija

Izdelek je potrebno očistiti nemudoma po vsaki uporabi;

1. Razstavite folijo vizirja, nosilec in elastični trak
2. Odstranite vidne delce ali umazanijo z mehko krpo. Pri tem uporabite toplo čisto vodo in milo ali detergent.
3. Sperite vse sestavne elemente s toplo vodo
4. Dezinficirajte izdelek z zato namenjenim dezinfekcijskim sredstvom, pri tem se držite navodil proizvajalca. Lahko se uporablja dezinfekcijska sredstva na osnovi etanola.
5. Osušite vse sestavne dele z mehko krpo.

Parno sterilizacijo (avtoklaviranje), kemično sterilizacija ali hladno sterilizacijo, lahko uporabnik izvede samo na lastno odgovornost. V primeru mehanskih poškodb, deformacij ali katerikoli drugih težav povezanih z naštetimi postopki proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

### POMEMBNO:

Izdelek vedno razstavite pred čiščenjem, pakiranjem ali skladiščenjem. Izogibajte se mehanskemu drgnjenju folije vizirja. Uporabljenim materialom se lahko s časom spremenijo lastnosti. Stik z različnimi kemikalijami lahko poslabšanje materialov še dodatno pospeši. Pred uporabo dezinfekcijskega sredstva priporočamo testiranje vpliva sredstva na izdelek, z nanosom na manjši del izdelka. Vedno se ravnajte po lokalnih veljavnih regulativah.

## Shranjevanje in vzdrževanje

Nekontaminiran izdelek hranite v originalni embalaži pri temperaturah 10-40°C v suhem in temnem prostoru. Izdelek naj ne bo izpostavljen kemikalijam, hlapom, toplotnim virom ali UV žarkom. Folija vizirja naj se po uporabi zavrže. V primeru prask, razpok ali drugih deformacij na zaslonki, ki vplivajo na pogled, naj se le ta takoj zavrže. Večkratna uporaba ene folije vizirja je na lastno odgovornost. Uporabnik lahko izdelek zgolj čisti in menja folije vizirja v skladu z navodili. Folije vizirje so dobavljive kot originalni nadomestni del. Rok uporabe izdelka je 2 leti, v kolikor so upoštevana navodila uporabe, v primeru opaznih deformacij, naj se izdelek zavrže pred omenjenim rokom.

## Oznake in pomen oznak

### PV CE

PV = Koda proizvajalca  
CE = CE – certificiran

Plastika Virant d.o.o.  
Pod Hrasti 20  
SI-1218 Komenda  
Slovenia, EU

CONTACT US:  
info@plastika-virant.si  
+386 1 780 40 80



Plastika Virant

www.plastika-virant.si